

upeasy Seat Assist™

GUIDE DE L'USAGER




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La sécurité se trouve au cœur de la conception unique et brevetée du UPEASY Seat Assist. Bien que UPEASY soit fait de manière à être le plus sécuritaire possible, vous devez prendre certaines précautions :

- 1** Assurez-vous de tenir fermement quelque chose quand vous vous levez. Le UPEASY Seat Assist est conçu pour s'utiliser dans les sièges qui ont des accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée. Il n'est pas recommandé d'utiliser UPEASY dans les chaises roulantes, les automobiles, les fauteuils inclinables ou les chaises de bureau dont les roues ne peuvent être bloquées.
- 2** Veillez toujours à ce que le fauteuil dans lequel vous utilisez votre UPEASY Seat Assist ne risque pas de glisser sur le plancher. En cas de doute, placez le dos du fauteuil contre un mur ou tout autre objet immobile.
- 3** Lorsque vous vous penchez pour ramasser un objet, ne vous appuyez pas sur vos pieds-sinon, UPEASY se mettra en action.

VEUILLEZ NOTER : Si, après avoir réglé votre UPEASY au poids approprié, le coussin ne descend pas lorsque vous vous y asseyez, il se peut que le mécanisme de levage soit rigide à cause d'une inactivité prolongée. Dans ce cas, réglez simplement le poids au niveau le plus bas et asseyez-vous sur le coussin.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

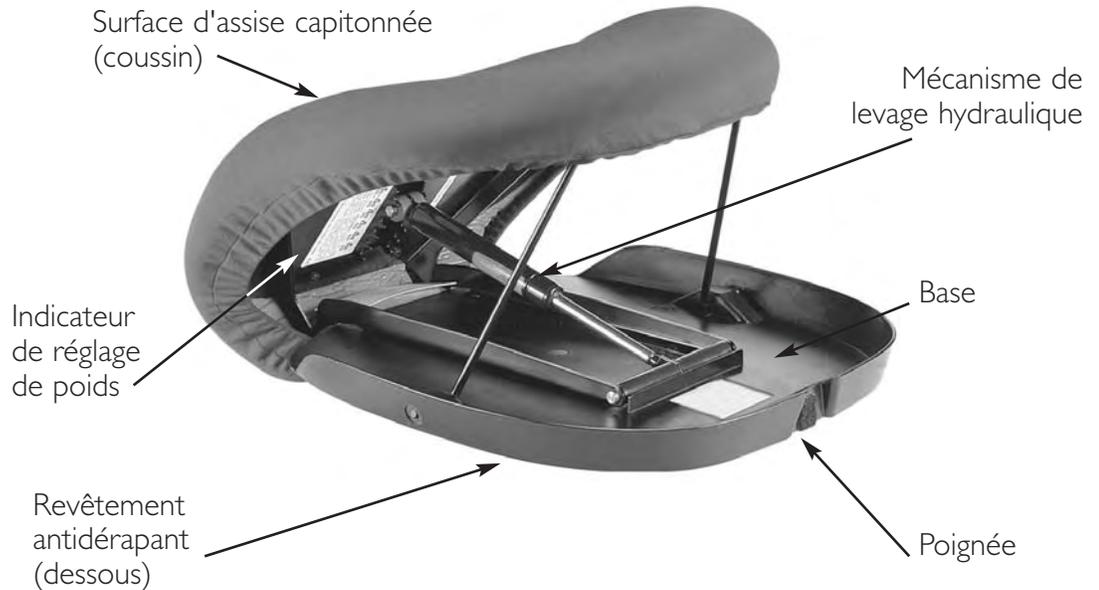

RÉGLAGES DU POIDS

- 1 Placez UPEASY en position verticale de manière à ce qu'il repose sur le côté opposé à la poignée.
- 2 Pressez sur la partie rembourrée du coussin, afin de l'amener à se plier vers l'extérieur. Cela permet un mouvement libre du mécanisme de levage (le coussin UPEASY est conçu pour se plier de cette même façon des milliers de fois. Cela n'endommagera pas l'appareil).
- 3 Choisissez un réglage de poids. Positionnez l'axe du mécanisme d'élévation au milieu des deux crans d'arrêt correspondant au poids de l'utilisateur. Assurez-vous qu'il s'ajuste fermement au centre des rainures de poids. (Les nombres imprimés sur l'indicateur de réglage ne sont qu'indicatifs. Le réglage que vous choisissez devrait dépendre des capacités et des préférences de l'utilisateur. Si vous choisissez un réglage plus faible, l'abaissement dans le siège se fera toujours en douceur, mais la poussée sera plus faible lors du mouvement ascendant).



Poussez vers **le bas**, de sorte que la partie rembourrée du siège se plie.



Choisissez le réglage qui convient au poids de l'utilisateur et positionnez le mécanisme de levage au centre des crans d'arrêt appropriés.

FERMER UPEASY POUR LE TRANSPORT

- 1 En suivant la même méthode que pour régler le poids, amenez le mécanisme de levage à glisser au-dessous du réglage le plus bas.
- 2 Fermez le coussin UPEASY et fixez la bande velcro au support velcro qui se trouve sur la poignée de transport.



INSTALLATION DANS LE FAUTEUIL

De manière générale, le UPEASY Seat Assist devrait dépasser de l'avant du siège tel que le montre l'illustration. Avec les fauteuils qui sont très profonds, on peut installer le coussin plus en arrière. Pendant qu'on utilise UPEASY, il faut garder les deux mains sur les accoudoirs du fauteuil (ou sur tout autre support approprié).

Remarque : Avec une chaise dont le siège n'est pas capitonné, le UPEASY Seat Assist devrait dépasser de l'avant comme le montre l'illustration.



S'ASSEOIR AVEC UPEASY



Après avoir ajusté les réglages de poids et installé UPEASY dans votre fauteuil, asseyez-vous sur la partie supérieure plate du coussin. UPEASY vous glissera lentement et en douceur dans votre fauteuil.

Remarque : Si le coussin ne s'abaisse pas lorsque vous vous asseyez dessus, ajustez le réglage à un poids plus faible.

SE LEVER AVEC UPEASY



Lorsque vous êtes prêt à vous mettre debout, commencez simplement à vous lever comme vous le feriez normalement, tout en vous penchant légèrement vers l'avant et en poussant avec vos bras et vos jambes. UPEASY sentira que vous êtes en train de vous lever et il vous soulèvera lentement et en douceur.

ENTRETIEN DE VOTRE UPEASY

La housse de votre UPEASY Seat Assist est 100 % polyester et on peut la retirer et la laver à la machine (la sécher en la pendant).

La surface du coussin UPEASY est enduite d'un revêtement spécial hydrofuge. On peut nettoyer la surface du coussin avec une éponge et un savon ou un détergent doux.

Remarque : Ne plongez jamais le coussin UPEASY complètement dans l'eau.

Pour remettre la housse après le nettoyage :

- 1 Ajustez le réglage de poids de votre UPEASY Seat Assist et placez celui-ci sur une table, le bout ouvert vous faisant dos.
- 2 Placez l'extrémité de la housse qui porte l'étiquette sur le «dos» ou le «dessus» du coussin et tirez-la vers le bas et sous le rebord avant.



Remarque : Pour assurer un ajustement approprié, la partie arrière ou supérieure de la housse est plus large que la partie avant. Il est recommandé de conserver entièrement ou en partie l'étiquette de votre housse pour faciliter, dans l'avenir, l'identification de cette partie arrière ou supérieure.



upeasy Seat Assist™

AUTRES PRODUITS D'UPLIFT TECHNOLOGIES

Uplift Technologies Inc. a pris l'engagement de mettre au point des produits de soins de santé novateurs, qui améliorent la qualité de vie de nos consommateurs. Pour plus d'informations sur d'autres produits d'Uplift, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse **www.up-lift.com**.

GARANTIE

CLAUSES DE GARANTIE

Uplift Technologies garantit que le UPEASY Seat Assist sera exempt de tout vice de matériel et de fabrication pendant un an à partir de la date de son achat initial.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale, à la négligence ou à l'emploi abusif, et elle n'est pas transférable.

Veillez noter que si vous essayez de réparer UPEASY vous-même, de quelque manière que ce soit, la garantie devient nulle.

*N'oubliez pas de poster votre
carte de garantie dès
aujourd'hui!*

SERVICE DE GARANTIE

Si UPEASY ne fonctionne pas conformément à la garantie (voir les Clauses de garantie à gauche), adressez-vous au lieu de vente d'origine.

Ce UPEASY Seat Assist a été acheté auprès de :

Fabriqué en Chine pour Uplift Technologies Inc.

*Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez contacter votre distributeur,
appelez-nous directement au 902-422-0804.*